






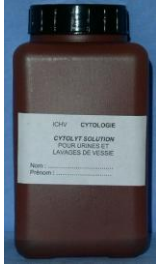

Probe	Transportmittel	Artikelnummer
URIN <ul style="list-style-type: none">Nicht den ersten Morgenurin sammeln, auch nicht mehrere Miktionen mischenDen ganzen Strahl sammeln	→ 500 mL-Flasche mit 30 mL CytoLyt® Solution	 612419
BLASENSPÜLUNG	→ 500 mL-Flasche mit 30 mL CytoLyt® Solution	
PUNKTATE : PLEURAL, PERITONEAL, PERIKARD, ASZITES <ul style="list-style-type: none">Die Entnahme schnellstens ins Antikoagulanzen gebenDiese Proben bitte nie in CytoLyt® Solution einlegen.	→ Flasche mit Antikoagulanzen unterschiedlichen Volumens	 50 ml : 11098 100 ml : 10140 250 ml : 10139 500 ml : 10138
LCR <ul style="list-style-type: none">Die Entnahme schnellstens dem Laboratorium zustellen	→ LCS-Röhrchen	 600012
SPUTUM <ul style="list-style-type: none">Sputum ist möglichst morgens nüchtern zu asservierenMund mit Wasser ausspülen, tief husten und aushustenZustellung eines Spezimens 3x wiederholen	→ 50 mL-Flasche	 604066
BRONCHIALSEKRET BRONCHIALASPIRAT BRONCHIALFLÜSSIGKEIT	→ 50 mL-Flasche	
BRONCHIALBUERSTE	→ Röhrchen von 50 mL mit 30 mL CytoLyt® Solution	
FEINNADELPUNKTION (BRUST, LEBER, SCHILDDRÜSE, SPEICHELDRÜSE, ...)	→ Röhrchen von 50 mL mit 30 mL CytoLyt® Solution	 603179
SEKRETION DER MAMILLE	→ Röhrchen von 50 mL mit 30 mL CytoLyt® Solution	

Das Material ist auf Bestellung im Lager des ZIWS verfügbar
Tel. 027 603 47 24