

Welches Material für welche Probe ?

Gynäkologie

1/3

Blutproben Hämatologie

Monovette® EDTA KE, 2.6 mL (violett) (Bestellnr. 675307)

- Kleines oder grosses Blutbild

Monovette® EDTA KE, 7.5 mL (violett) (Bestellnr. 675308)

- Nachweis von irregulären Antikörpern und/oder Blutgruppe

Chemie

Monovette® Serum mit Gel, 7.5 mL (braun) (Bestellnr. 675326)

Serologie

Monovette® Serum mit Gel, 7.5 mL (braun) (Bestellnr. 675326)

Genetik


Spezialformular « Analysenauftrag – Molekulargenetik » ausfüllen + Unterschrift.

Monovette® HEPARINE ISO, 4.9 mL (grün) (Bestellnr. 675316)

- Blutkaryotypisierung.

Monovette® EDTA KE, 7.5 mL (violett) Bestellnr. 675308)

- Genetik-Analysen.

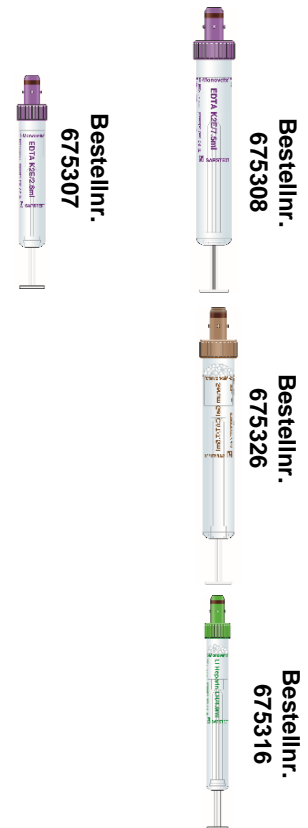

Mikrobiologische Proben

Abstrichtupfer Bakteriologie/PCR eSwab (rosa) (Bestellnr. 603233)

- Vaginalabstrich

Abstrichtupfer Bakteriologie/PCR eSwab (orange) (Bestellnr. 623624)

- Harnröhrenabstrich

- Nachweis allgemeiner Bakteriologie
- nur Nachweis von Streptokokken B
- dieser gleiche Abstrichtupfer kann ebenfalls zum Nachweis mittels PCR von *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Herpes* und *HPV* verwendet werden.

Thin-Prep PAP TEST Behälter, 50 mL (davon 20 mL Methanol) (Bestellnr. 603505)

- kann ebenfalls zum Nachweis mittels PCR von *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Herpes* und *HPV* verwendet werden.



Proben des 1. Trimesters

Monovette® Serum mit Gel, 7.5 mL (braun) (Bestellnr. 618946)

- Freies β -HCG
- PAPP-A.

Steriler trockener Behälter (leer), 60 mL (Bestellnr. 638259) **NaCl 0,9 %** hinzufügen
Spezialformular « Analysenauftrag – Molekulargenetik » ausfüllen + Unterschrift.

- Karyotypisierung der Chorionvillositäten im Fruchtwasser.
(+ eine mütterliche Kontamination der Probe ausschliessen, indem 5 mL EDTA-Blut bei der Mutter entnommen wird, mit separatem Analysenauftrag).

Monovette® EDTA KE, 7.5 mL (rot) (Bestellnr. 612353)




Spermogramm

Sammelgefäss für Sperma (Bestellnr. 614458)

Telefonnr. für Terminabsprache : Rennaz ☎ 058 773 20 16
Sitten ☎ 027 603 48 24
Brig ☎ 027 970 36 75

Spezialformular « Spermogramm » ausfüllen.

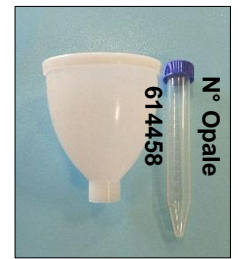


Zytologieproben

Thin-Prep PAP TEST Behälter, 50 mL (davon 20 mL Methanol) (Bestellnr. 603505)

- Die Kontrolle ermöglicht eine Diagnose von Uteruskrebs im Vor- und Frühstadium
- Ekto- und Endozervix-Abstriche, Vagina und Vulva.




- CytoBrush-Bürsten + Spachteln (Bestellnr. 603831)

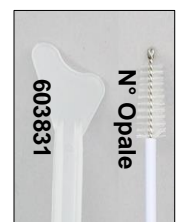

- Cervex® Brush-Bürsten (Bestellnr. 604225)



- Cervibrush-Bürste + Profile (Bestellnr. 604226)

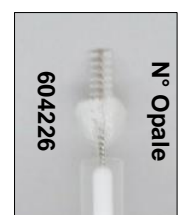



Histologieproben

- Behalter mit gepuffertem Formalin, 20 mL (Bestellnr. 641337)
- Behalter mit gepuffertem Formalin, 50 mL (Bestellnr. 639954)
- Behalter mit gepuffertem Formalin, 120 mL (Bestellnr. 630248)
 - Biopsien

