

Welche Art von Material fur welche Entnahme?

Verfahren zur Entnahme von Speichel fur die PCR SARS-CoV-2

Material **BIOCOMMA**

Zur Verfugung im Zentrallager des ZIS, magasin.sion@hopitalvs.ch

- Kit zur Speichelentnahme (Opale-Nr. 674558)



Anleitung fur die Entnahme

WICHTIG:

Eine Stunde vor der Entnahme nicht essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen.

- 1) Auf dem grossen Rohrchen mit dem Trichter Name, Vorname und Geburtsdatum des Patienten eintragen. Das kleine Rohrchen mit dem blauen Verschluss muss nicht identifiziert werden.
- 2) Die Testperson bitten, sich zu rauspern und in das grosse Rohrchen mit dem Trichter zu spucken, **bis das Niveau des Speichels** die blaue Markierung erreicht.
- 3) Das **rosafarbene** flussige Medium (kleines Rohrchen mit blauem Verschluss) in das grosse Rohrchen mit dem Trichter leeren. **Den blauen Verschluss nicht wegwerfen.**
- 4) Den Trichter, der zur Speichelentnahme gedient hat, losschrauben.
- 5) Den blauen Verschluss (des kleinen Rohrchens) auf das grosse Rohrchen aufschrauben.
- 6) Das Rohrchen 2-3-mal kippen, um die Probe mit dem Medium zu vermischen.
- 7) Das Rohrchen ins Labor ubermitteln. Das kleine Rohrchen und der Trichter konnen entsorgt werden.

